





Read instructions for use.

INDICATION

For use as replacement tubing with ConvaTec® Night Drainage Container.

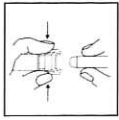

1. Remove the protective cap from the Accuseal® Connector by pulling apart while squeezing the arms.

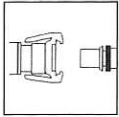

2. To attach the tubing to the container cap, position the parts as shown and push until they snap in place. To remove the tubing, pull apart while squeezing the arms.

3. See the instructions for use packaged with the ConvaTec® Night Drainage Container Set for attachment to a urostomy pouch.

DISPOSAL

Adhere to local disposal requirements/regulations.

STORAGE CONDITIONS



Storage temperature.



Keep dry. Avoid high humidity.



Lot/control number



Expiry date

Note: Should irritation occur, discontinue use and consult a healthcare professional.


For more information on ConvaTec products, contact us at the address below.




Lea instrucciones para el uso.

INDICACIÓN

Para usar como reemplazo de los tubos con el recipiente de drenaje nocturno ConvaTec®.

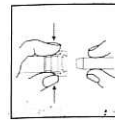

1. Quite la tapa protectora del conector Accuseal® tirando para separar mientras aprieta los vástagos.

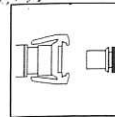

2. Para conectar los tubos a la tapa del recipiente, coloque las piezas como se muestra y empuje hasta que se conecten con un chasquido. Para quitar los tubos tire para separarlos mientras aprieta los vástagos.

3. Para conectar a una bolsa de urostomía, consulte las instrucciones para el uso incluidas con el juego de recipiente de drenaje nocturno ConvaTec®.

DISPOSICIÓN

Se debe cumplir con los requisitos o reglamentaciones locales para disposición de residuos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO



Temperatura de almacenamiento.



Mantener seco. Evite la humedad alta.



Lote/Nº de Control



Fecha de expiración

Nota: En caso de ocurrir irritación, suspenda el uso y consulte a un profesional de atención médica.

Para obtener más información sobre los productos ConvaTec, póngase en contacto con nosotros a la dirección al pie.