



en

- Step 1 — Remove Defender Safety Blood Collection Needle Holder from package. Ensure that thumb tab is at front end of holder.
- Step 2 — Select appropriate needle and blood tubes for required sample. (Note that the 1-inch holder only fits 1-inch needles.) Remove the cover from back end of needle and thread needle clockwise into the holder tip until securely seated.
- Step 3 — Perform venipuncture. Remove last blood tube from holder prior to removing needle from patient. After removing needle, press thumb tab until it locks into the down position.
- Step 4 — While pressing thumb tab, slide thumb tab toward the rear opening of holder until it locks. A loud, audible click will be heard upon lock activation. Dispose of the holder in an appropriate manner.

nl

- Stap 1 — Neem de veilige Defender bloedafnamehouder uit de verpakking. Zorg dat de duimtab aan de voorkant van de houder is.
- Stap 2 — Kies een geschikte naald en geschikte bloedbuizen voor het vereiste monster. (Hierbij dient te worden opgemerkt dat een 1-inch-houder alleen past op 1-inch-naalden). Verwijder het omhulsel van de achterzijde van de naald en schroef de naald rechtsom in de houdertip tot hij goed vastzit.
- Stap 3 — Voer een venapunctie uit. Neem de laatste bloedbuis uit de houder voordat u de naald uit de patiënt verwijderd. Druk na het verwijderen van de naald op de duimtab tot hij in de laagste stand is vergrendeld.
- Stap 4 — Schuif de duimtab, terwijl u erop drukt, naar de achterste opening van de houder tot hij vergrendeld is. Na de vergrendeling klinkt een luide klik. Voer de houder op een geschikte wijze af.